

# Fixador Radiográfico

## INSTRUÇÕES DE USO

**Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos de acordo com a ABNT NBR 14725-2.**

**FIXADOR RADIOGRÁFICO:** É uma solução fixadora destinada ao processamento químico de filme radiográfico. Produto pronto para uso, não necessita diluição.

**COMPOSIÇÃO:** Ácido acético, tiosulfato de sódio, sulfato de sódio e água.

**INDICAÇÕES:** É indicada para a etapa de fixação realizada no processamento químico radiográfico, permitindo que ocorra a fixação da imagem radiográfica.

**INSTRUÇÕES DE USO:** No recipiente da câmara portátil coloque uma quantidade da solução fixadora que seja suficiente para total imersão da película radiográfica. Após o processo de revelação realizado com o *Revelador radiográfico Indusbello* e lavagem intermediária em água por 30 segundos, coloque a película totalmente submersa na solução fixadora durante quatro minutos. Posteriormente, faça a lavagem final em água por pelo menos 7 minutos e deixe a película secar naturalmente ou em secadora.

**ADVERTÊNCIAS:** Produto de uso exclusivamente profissional. Não realizar diluição da solução, produto pronto para uso. Quando o recipiente com a solução fixadora não estiver em uso, ele deve ser mantido tampado. A embalagem original em que é mantida

a solução fixadora remanescente deve ser bem fechada. Não ingerir. Em contato com a pele, pode provocar reações alérgicas. Provoca irritações/lesões em mucosa ocular. Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A FISPQ desse produto pode ser solicitada pelo e-mail [indusbello@indusbello.com.br](mailto:indusbello@indusbello.com.br). Telefone para emergências ambientais ou de transporte: 0800 110 8270 Pró-Química. Para demais dúvidas sobre o produto entre em contato com o SAC Indusbello pelo telefone: +55 (43) 3378-8300.

**PRECAUÇÕES:** Utilize EPI para manipular a solução. Não cheirar o produto. Caso haja contato com a pele ou mucosas, lavar imediatamente com água abundante. Se ingerido, procurar imediatamente auxílio médico, levando a embalagem do produto. Evitar temperaturas elevadas, umidade e contato com materiais incompatíveis. Manter fora do alcance de crianças.

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar em temperatura ambiente (25°C), protegido da luz, calor e umidade. Manter a embalagem hermeticamente fechada após o uso, em local limpo e seco.

**PRAZO DE VALIDADE:** 18 meses.

**DESCARTE:** Descartar conforme a legislação vigente. A embalagem do produto não deve ser reaproveitada.

 **Uso odontológico**  
Odontologic use  
Uso odontológico

 **Serviço de atendimento ao profissional**  
Technical support  
Servicio post-venta al profesional  
[indusbello@indusbello.com.br](mailto:indusbello@indusbello.com.br)  
[www.indusbello.com.br](http://www.indusbello.com.br)

**Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)

 **indusbello co.**

Rev 00 - 28.10.2022 | Cód 32862889007  
ANVISA: Dispensado.