

Revelador Radiográfico

INSTRUÇÕES DE USO

Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

REVELADOR RADIOGRÁFICO: É uma solução reveladora de ação rápida destinada ao processamento químico de película de filme radiográfico. Produto pronto para uso, não necessita diluição.

COMPOSIÇÃO: Hidroquinona, sulfito, fenidona, carbonato de sódio e água.

INDICAÇÕES: É indicado para a etapa de revelação realizada no processamento químico radiográfico, permitindo que a imagem radiográfica se torne visível.

INSTRUÇÕES DE USO: No recipiente da câmara portátil coloque uma quantidade da solução reveladora que seja suficiente para total imersão da película radiográfica. Na câmara portátil, abra o filme removendo a película e fixando-a em um grampo/colgadura. Coloque a película totalmente submersa na solução reveladora durante 20 a 30 segundos, de acordo com o tempo de uso e oxidação da solução. Posteriormente, realize o banho intermediário em água durante 30 segundos. Finalize o processamento químico com o *Fixador radiográfico Indusbello* e lavagem final em água.

ADVERTÊNCIAS: Produto de uso exclusivamente profissional. Não realizar diluição da solução, produto pronto para uso. Quando o recipiente com a solução reveladora não estiver em uso, ele deve ser mantido tampado. A embalagem

original em que é mantida a solução reveladora remanescente deve ser bem fechada. Não ingerir. Em contato com a pele, pode provocar reações alérgicas. Provoca irritações/lesões em mucosa ocular. Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A FISPQ desse produto pode ser solicitada pelo e-mail indusbello@indusbello.com.br. Telefone para emergências ambientais ou de transporte: 0800 110 8270 Pró-Química. Para demais dúvidas sobre o produto entre em contato com o SAC Indusbello pelo telefone: +55 (43) 3378-8300.

PRECAUÇÕES: Utilize EPI para manipular a solução. Não cheirar o produto. Caso haja contato com a pele ou mucosas, lavar imediatamente com água abundante. Se ingerido, procurar imediatamente auxílio médico, levando a embalagem do produto. Evitar temperaturas elevadas, umidade e contato com materiais incompatíveis. Manter fora do alcance de crianças.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente (25°C) protegido da luz, calor e umidade. Manter a embalagem hermeticamente fechada após o uso, em local limpo e seco.

PRAZO DE VALIDADE: 18 meses.

DESCARTE: Descartar conforme a legislação vigente. A embalagem do produto não deve ser reaproveitada.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileña



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 28.10.2022 | Cód 328628880005
ANVISA: Dispensado